


## Positioneringslinjerna


Positioneringslinjerna släcks efter 2 minuter. Aktivera dem med ett touch på någon av nedan knappar på displayen.

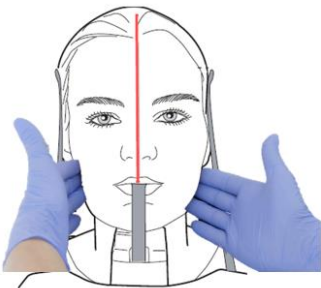


**Mittlinjen**, hjälper dig att ställa in patientens huvud i mitten och inte tippat eller vridet. Det är viktigt att stå rakt framför patienten för att få en bra överblick. Använd händerna för att placera huvudet korrekt. Titta inte bara på den röda linjen. Ta ett steg tillbaka och titta på hela huvudet i förhållande till linjen.



**Frankfurtlinjen**, horisontell hjälplinje som kan användas för att ställa in ocklusionplanet. Många använder sig av orbitakanten och tragus. Linjen höjs och sänks med hjulet på pelaren. Om linjen inte sammanfaller mellan orbita och tragus. Justerar huvudets lutning, knapparna med de stora pilarna upp och ned. *Tänk på att nacken alltid skall vara rak och sträckt!*

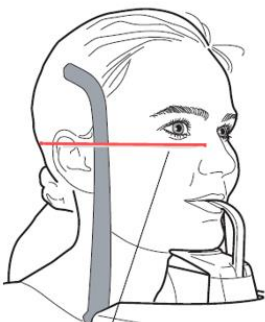

**Fokuslinjen**, hjälper dig att placera patienten i apparatens fokusskikt. Det är en vertikal linje som kan flyttas framåt och bakåt. Placera linjen mellan 2:an och 3:an i överkäken och näsvingen om patienten är tandlös. Utgå från att patientens incisiver skall bita i skårorna på bitpinnen. Kan inte patienten bita med ök och uk i skårorna pga av t ex bettavvikelse, placera den käke som är av störst intresse i skåran. När du placerar linjen skall du ställa dig så du tittar rakt på linjen vilket gör det lättare att placera linjen korrekt

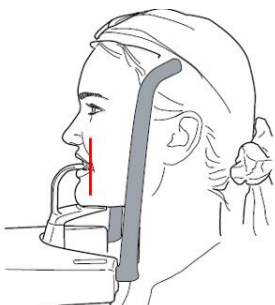

Flytta linjen framåt och bakåt med pilarna på displayen, 1 touch är 1 mm.